

# Användarguide


## VaPro™ Hydrofil tappningskateter



Förbered genom att ta fram allt du behöver. Tvätta händerna noggrant och hitta en bekväm ställning innan du kateteriserar dig.



Öppna förpackningen genom att ta tag i ett av fingerhålen och dra det halvvägs ner/mot dig. Låt katetern ligga kvar i förpackningen och placera den lättåtkomligt på en plan yta.

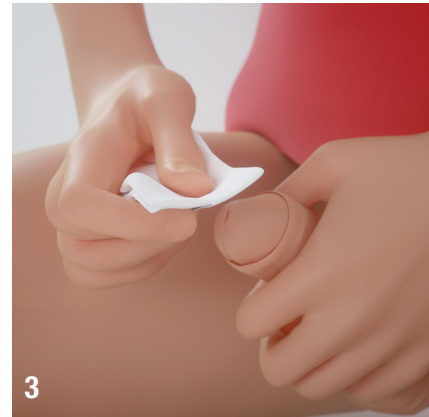


Dra tillbaka ev. förhud och rengör urinrörsmynningen, enligt din vårdgivares instruktioner. Håll kvar taget om penis tills hela proceduren är avslutad.



Ta ut katetern ur förpackningen.



Ta av det röda locket från den skyddande tippen.

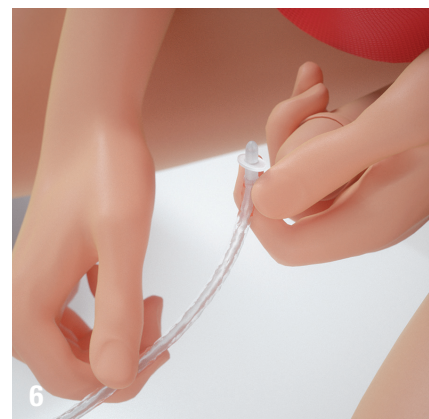

Greppa en bit upp på katetern, med din lediga hand.



HydraBalance™  
Lubricating Technology

VaPro™  
Hydrofil tappningskateter



Lyft penis mot magen så att urinröret rätas ut. Tryck försiktigt ihop penisen med tummen och pekfingeret för att vidga urinrörsmynningen. Placera den skyddande tippen mot urinrörsmynningen och håll fast den med samma hand som håller i penis.



För långsamt in katetern tills urinen börjar rinna, för då in katetern ytterligare någon centimeter. Därefter kan penis föras ner i normalt läge igen. När urinen slutat rinna, dra långsamt ut katetern en bit. Om det börjar rinna igen, pausa tills det slutar. Ta bort katetern när det åter slutat rinna, då är urinblåsan helt tömd.



Kassera produkten i hushållsavfallet och tvätta händerna när du är klar.

**KATETERN FÅR INTE SPOLAS NER I TOALETTEN.**

Ej tillverkad av naturgummi. Tappningskateter, ej tillverkad av PVC eller ftalater. Produkten består av: polyuretanhylsa, termoplastisk elastomerspets och slang.

**Indikationer och avsedd användning:** Den här tappningskatetern är en flexibel rörenhet som förs in i urinröret av manliga, kvinnliga och pediatrika patienter som behöver tömma urin från blåsan.

**WARNING:** Använd inte om förpackningen är skadad eller öppnad. För att minska risken för infektioner och andra komplikationer ska produkterna inte återanvändas. Om obehag eller något tecken på skada förekommer ska du sluta använda produkten och rådfråga din läkare.

**Försiktighetsåtgärder:** Rådfråga din läkare innan du använder produkten om något av följande tillstånd förekommer:

- Skadad uretra
- Tydlig förträngning
- Uretrit – inflammation i uretra
- Bitestikelinflammation – inflammation i bitestikeln
- Oförklarlig blödning i uretra
- Falsk passage
- Prostatit – inflammation i prostatakörteln

Självkateterisering ska följa vårdplanen och rådgivningen från din läkare och enbart utföras enligt den tillhandahållna bruksanvisningen. Eftersom kateteriseringsfrekvensen varierar från person till person bör den rekommenderade frekvensen för kateterisering tillhandahållas av läkare. Om du har andra frågor om kateteriseringen ska du kontakta din läkare.

**VIKTIGT:** Förvara förpackningarna liggandes och vid normal rumstemperatur. Om du behöver hjälp med produkterna kontaktar du en hälsovårdsinrättning. Kontakta din lokala distributör eller tillverkaren, samt lokal behörig myndighet, om en allvarlig personskada (incident) skulle inträffa i samband med användning av produkten. För mer information, se [www.hollister.com/authority](http://www.hollister.com/authority) eller kontakta din lokala distributör.

Före användning, var noga med att läsa användarinstruktionerna för information om avsedd användning, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och instruktioner.

## Dansac & Hollister

Enhagslingan 5  
SE-187 40 Täby  
Tel: 02001 25514  
[info.se@hollister.com](mailto:info.se@hollister.com)  
[www.hollister.se](http://www.hollister.se)